

PiggyTrim

- moderne klovpleje

Klovbeskæringsboks til søer giver nem og skånsom klovpleje i hverdagen.

Regelmæssig klovbeskæring er vigtig for både dyrevelfærd og produktion. Når soen både går og står godt, spiser og drikker soen bedre og producerer mere mælk. En god klovbeskæringsboks gør arbejdet lettere, hurtigere og mere sikkert, både for soen og for den person der udfører arbejdet.

Vores PiggyTrim klovbeskæringsboks er udviklet til systematisk klovpleje i so-besætninger. Soen går selv ind, hvorefter boksen hæves hydraulisk. Soen ligger helt roligt og arbejdet kan udføres i en behagelig højde med fri adgang til alle fire klove.

PiggyTrim klovbeskæringsboksen kan placeres dér, hvor den passer bedst i stalden, og den fås med beslag til både fast gulv og spaltegulv. Når den er løftet op, kan du gå uhindret under den, uden at den står ikke i vejen - selv i smalle staldgange.

Klovbeskæring i praksis

Selve klovplejen tager som regel 5-10 minutter pr. so. Den kan udføres med en énhånds-vinkelsliber. Erfaringen viser, at når klovbeskæringen bliver en fast del af rutinen, falder antallet af udsatte søer hurtigt.

Det giver færre dyr i sygestierne, lavere medicinforbrug og bedre produktion. Mange oplever, at søerne hurtigere rejser sig, går mere stabilt og passer grisene bedre.

Scan koden for at se videoer



2 timers opstartskursus



FORDELE VED EN MODERNE KLOVBESKÆRINGSBOKS

- Skånsom for soen
- God og ergonomisk arbejdshøjde
- Stor frihøjde betyder, at den kan placeres i gangarealer
- Enkel betjening med to knapper
- Nem adgang til klovene fra begge sider



Piggy Lanolin Spray 250 ml 12 stk. pakket

Et naturprodukt baseret på lanolin som gør den ekstremt vedhæftende og derved er meget beskyttende.

Varenr.: 1116-1804



Piggy Salicylic Care Paste 300 ml

Bruges ved klovbeskæring som desinfektion under vat og bandage. Den effektive vedhæftning og desinfektion gør den også velegnet til behandling af skuldersår under skulderkappen til søer.

Varenr.: 1223-0233



Piggy Care Spray 300 ml 12 stk. pakket

Hjælper med at genoprette huden ved sår. Holdbar, hurtigtørrende og beskyttende spray til huden.

Varenr.: 1116-1805



Piggy Tar spray 400 ml 12 stk. pakket

- Kan sprøjtes på våde og fugtige klove, da tjæren fortrænger væske.
- Den er ekstrem vedhæftende og dermed en god beskyttende sårpray.
- Optimal til brug under klovbeskæring.

Varenr.: 1116-1803



Piggy Dry Pads 12 stk.

Dry Pads er lavet for at sikre den bedste behandling af såret, ved at holde snavs og skidt ude, samtidig med at holde behandlingsproduktet på såret. Vi anbefaler at bruge Piggy Dry Pads sammen med Piggy Salicylic Care Paste.

Varenr.: 1116-1689



Piggy Dry Pads 50 stk.

Dry Pads er lavet for at sikre den bedste behandling af såret, ved at holde snavs og skidt ude, samtidig med at holde behandlingsproduktet på såret. Vi anbefaler at bruge Piggy Dry Pads sammen med Piggy Salicylic Care Paste.

Varenr.: 1116-1691



Piggy Pro bandage 9 cm x 6 meter

Blå. 12 stk. pakket.

Varenr.: 1116-1681



Piggy Pro bandage 9 cm x 6 meter

Rød. 12 stk. pakket.


Varenr.: 1116-1682



Piggy hoof disc True grit

- Beskæringssskive belagt med tungsten
- Hurtig beskæring og meget lang levetid
- Kan bruges på både våde og tørre klove
- Ingen støv eller lugt
- Velegnet til enhånds vinkelsliber
- Ø115 mm med 22.23 mm hul

Varenr.: 1116-1207

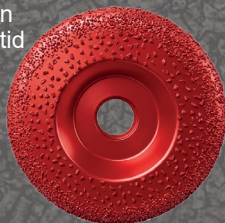

Metalhandske til klovpleje

Kan bruge på både venstre og højre hånd.

Inkl. stofhandske.

Str. Medium:

Varenr.: 1116-7301

Str. XL:

Varenr.: 1116-7302



Piggy Care Starter Kit forbindelse - 50 søer

Behandlingspakke til 50 x sår på ben og klove.

- Piggy Pro bandage
- Piggy Dry Pads
- Piggy Salicylic Care paste
- Piggy Lanolin Spray
- Piggy Tar spray
- Piggy Care spray
- Piggy Pistol
- Piggy bandage kniv



Piggy Care Opstart Kit til klovpleje

Indeholder: Piggy Pro bandage, Piggy Dry Pads, Piggy Salicylic Care paste, Piggy Lanolin Spray, Piggy Tar spray, Piggy Care spray, Piggy hoof disc true grit, Piggy Pistol, Piggy bandage kniv, Demotec klov check, metalhandsker, vinkelsliber, høreværn, støvmaske, sikkerhedsbrille

Varenr.: 1116-1693

